



GL5 |

Equipo Elevador Móvil de Pacientes

Guldmann™

Elevador móvil GL5




Facilita las transferencias y reduce el riesgo de lesiones de espalda en los cuidadores. Además, mejora la comodidad y la seguridad de cuidadores y usuarios

Los elevadores móviles GL5 son las alternativas de suelo a las soluciones de elevación montadas en el techo de la gama de productos de Guldmann.

Escuchamos los consejos y las impresiones de nuestros usuarios durante más de un cuarto de siglo para crear la próxima generación de elevadores móviles en función de sus deseos y necesidades y las de los cuidadores y usuarios. Y seguimos haciéndolo

Creemos en la calidad, la sencillez y la atención a los detalles para ofrecer productos que crean más «tiempo para los cuidados».

La atención a los detalles, que facilita el uso del elevador y proporciona comodidad y una mayor seguridad en el proceso de elevación, convierte a los elevadores de suelo móviles GL5 en únicos.

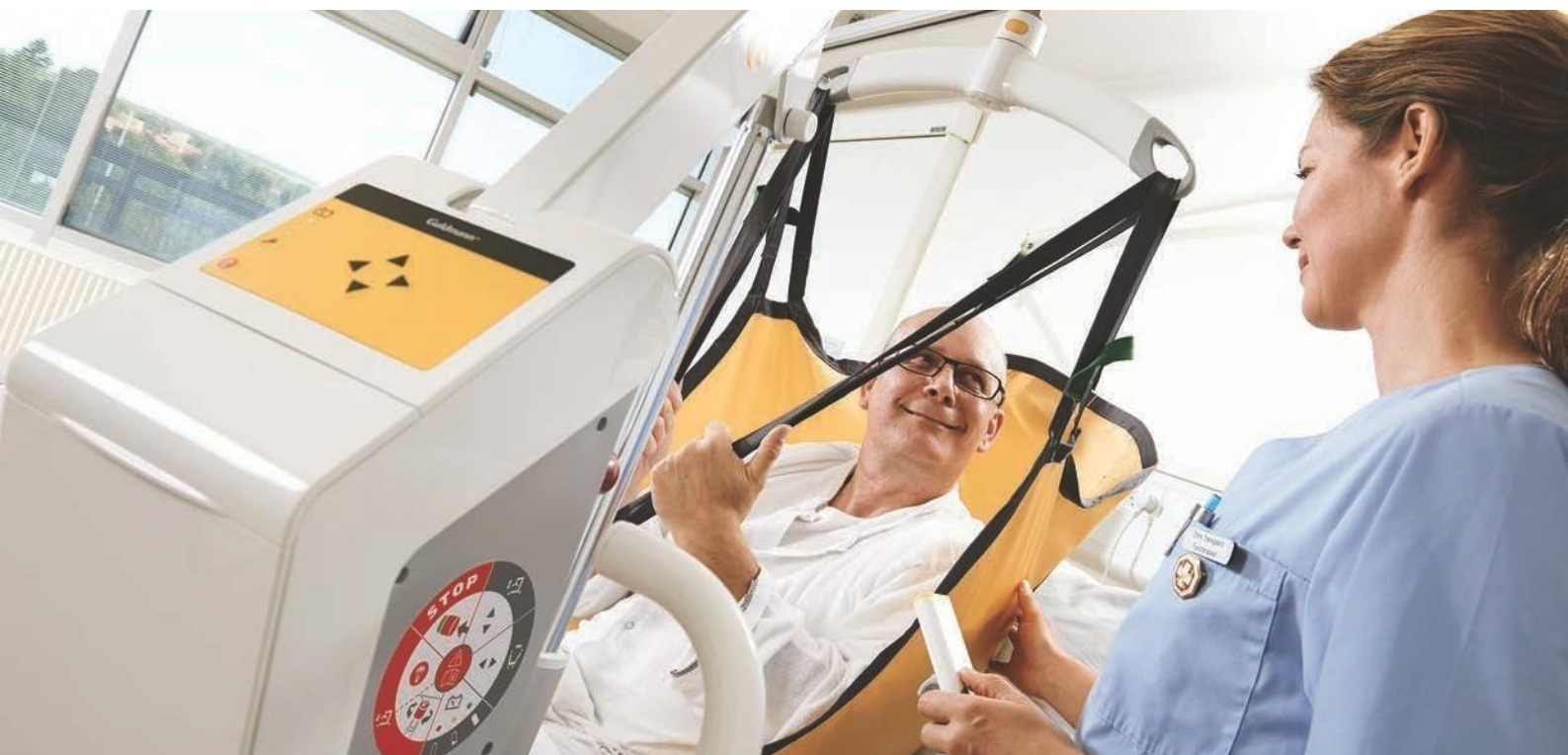

**GL5 – la fuerza proviene
del interior**

Características del GL5.1

Tramo bajo – capacidad para elevar pesos directamente desde el suelo

Tramo alto – puede elevar usuariosaltos con eslingas anchas sin dificultad

Flexibilidad – con la eslinga / los accesorios adecuados, el GL5 puede cumplir todos los requisitos de desplazamiento y manipulación

Facilidad de uso – uso cómodo para personas altas y bajas. Puede manejarse mediante el control manual o el panel de control

Fiabilidad – el GL5 es resistente, estable, fiable y seguro y se ha diseñado para el uso frecuente en entornos de trabajo profesionales

Inteligencia – la última tecnología proporciona acceso a las estadísticas a través de la SIC (consola de información del mantenimiento), que muestra

- El número de elevaciones
- El número de elevaciones desde el último mantenimiento
- La vida útil de los componentes (accionador, batería)
- Informes de errores
- Futuras actualizaciones de software

El GL5 también tiene un indicador visual de servicio y está preparado para futuras actualizaciones del software.

Diseño moderno – con carga interna y externa para adaptarse al entorno en el que se utilice. GL5 ha sido galardonado con el premio Red Dot Award por el diseño del sistema / elevador de techo GH3

Elevador completo – el GL5 soluciona múltiples situaciones de desplazamiento y manipulación, además de ser ergonómicamente seguro y sólido para cuidadores y usuarios.

eléctricos, que permiten un acceso sencillo alrededor de sillas y bañeras y la elevación desde el suelo.

Los elevadores móviles GL5, con múltiples funciones, responden a las necesidades y los requisitos de los entornos profesionales de asistencia, donde los equipos de elevación son muy necesarios. El esmerado diseño garantiza un amplio espacio de trabajo para que el cuidador realice una elevación del usuario segura y cómoda.

El elevador GL5 es muy estable, pues la configuración permite una capacidad de elevación perfectamente adecuada. Estos elevadores pueden cargarse interna o externamente para adaptarse a los diversos entornos de trabajo. Las ruedas de baja fricción, la palanca de empuje diseñada ergonómicamente y el diseño de elevación hacen que resulte más sencillo maniobrar los elevadores. Botones de uso sencillo, indicadores y funciones de seguridad con encendido y apagado automático, así como funciones de descenso y parada de emergencia de fácil acceso.

El elevador GL5 está disponible en dos modelos, con capacidades de elevación de 155 o 205 kg, respectivamente. Los dos modelos cuentan con elevación y ajuste de anchura




Componentes Equipo GL5.1



1. Gancho de elevación
2. Brazo de elevación
3. Caja de control
4. Batería
5. Asas de empuje
6. Parada de emergencia
7. Bajada manual de emergencia
8. Control manual

9. Motor de elevación
10. Frenos en ruedas traseras
11. Plataforma inferior
12. Indicador de batería
13. Indicador de mantenimiento
14. Indicador hacia arriba/abajo
15. Indicador abrir/cerrar

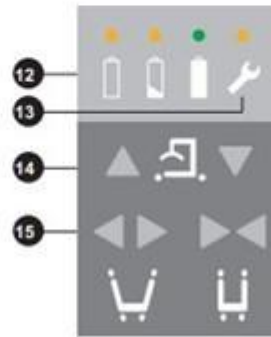

Capacidad de elevación máx.:	155/205 kg
Número de elevaciones por carga con una carga de 85 kg:	50 elevaciones
Radio de giro:	1295 mm
Altura de elevación máx.:	1759 mm
mín.:	456 mm
Intervalo de elevación:	1303 mm
Ajuste de anchura eléctrico máx.:	1410 mm
mín.:	695 mm

Lista de verificación de operadores antes de su uso:

- Asegúrese de que el levantador se mueva libremente sobre sus ruedas. Accione los frenos (10) para asegurarse de que funcionan.
- Levante y baje el brazo de elevación (2) mediante los botones de control (14) en el control manual (8).
- Compruebe que el ajuste de la base (15) se abre y se cierra, mediante el mando manual (8).
- Compruebe la función de emergencia presionando los botones (16) en la caja de control (3).
- Compruebe el funcionamiento manual girando el mando (7) en el sentido de la flecha.
- Compruebe que el botón de parada de emergencia (6) esté funcionando; presione y pruebe el control manual; gire en la dirección de la flecha para soltarlo.

- Asegúrese de que la barra de suspensión esté libre para girar y oscilar (1) y verifique que la barra de suspensión esté firmemente sujeta a la pluma (2).

Opciones de carga

- Cargador integrado en la caja de control: enchufe el cable de red en la toma de corriente.
- Cuando la energía está conectada, la luz LED verde en la caja de control se enciende.
- El diodo verde y amarillo en la caja de control (3) se ilumina durante la carga, cuando está completamente cargado, el diodo amarillo se apaga.

Características del GL5.1

Fácil de mantener


- Batería fácil de cambiar para una posible carga externa
- Bandeja para los pies fácil de retirar y limpiar
- Indicador visual de mantenimiento
- Preparado para futuras actualizaciones de software
- Acceso a las estadísticas a través de SIC (consola de información del mantenimiento):
 - Número de elevaciones, vida útil
 - Número de elevaciones desde la última inspección
 - Número de avisos de la batería
 - Número de errores

Funcionamiento sencillo y uso seguro

El uso del GL5 es sencillo para el cuidador. La elevación y el descenso se controlan eléctricamente, así como el ajuste de la anchura de las patas. Las palancas de empuje son ergonómicas y se han diseñado para adaptarse a la mayoría de alturas y tamaños.

El elevador dispone de una asa de empuje trasera en el pie para mejorar la maniobrabilidad. El GL5 puede manejarse mediante el control manual o el panel de control. La seguridad ha sido la principal preocupación del diseño del GL5 de Guldmann. Cuenta con un botón de parada de emergencia para situaciones inesperadas de acceso fácil y que se puede liberar manualmente. Dispone de descenso de emergencia (opcional) electrónico o manual, avisos de la batería (visuales y acústicos), indicador de sustitución del accionador y la capacidad de obtener información del uso del elevador a través de la interfaz SIC.

Finalmente, la guía de usuario, con un resumen de funcionamiento, se encuentra en un lateral de la caja de control.

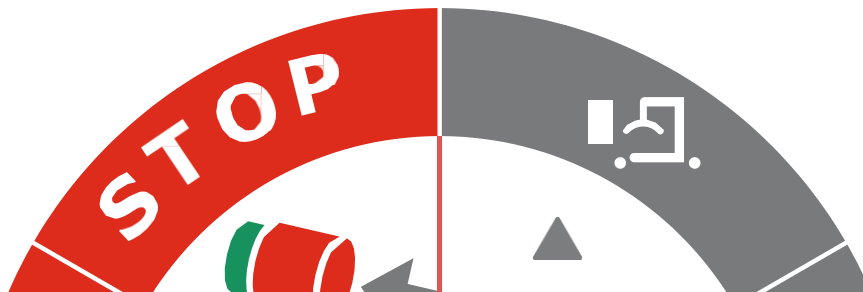


El GL5 se ocupa de todas las tareas de elevación



Elevación desde y hacia el suelo

GL5 puede levantar al paciente directamente desde el suelo hasta una silla o la cama. Por esta razón, GL5 es ideal en caso sea necesaria una elevación inesperada en un lugar donde no hay un sistema de elevación instalado en el techo. La sección inferior del elevador está diseñada para dejar mucho espacio para el paciente, además, el alcance considerable del brazo de elevación hace que el usuario no se sienta cerrado en un espacio estrecho.


GL5 es ideal para ser utilizado en fisioterapia, donde los usuarios necesitan ser levantados, por ejemplo, desde una silla hasta una colchoneta para ejercicios. La sección inferior se puede ajustar a la posición más amplia a fin de asegurar que hay espacio suficiente para llevar a cabo el levantamiento directamente sobre la colchoneta.

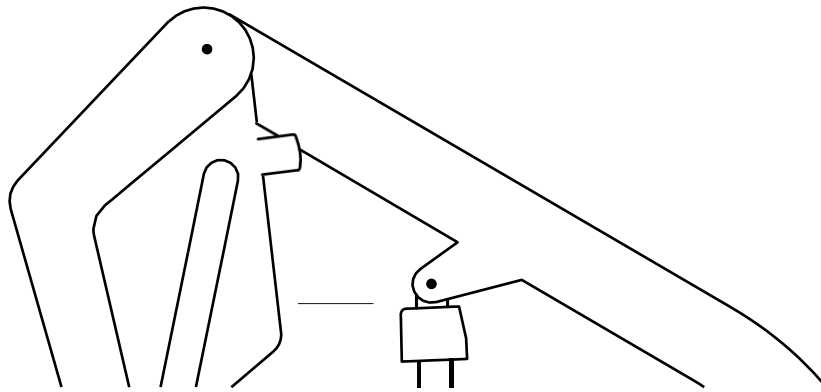


«Los elevadores móviles son especialmente adecuados para lugares y situaciones en las que no esté al alcance un sistema de elevación montado en el techo. Puede ser que no exista espacio para una instalación fija o que normalmente no se lleven a cabo elevaciones. Independientemente del motivo, un elevador móvil es un complemento práctico y rentable y un medio excelente de seguridad adicional»

Cuidador que se ocupa de pacientes de un modo seguro



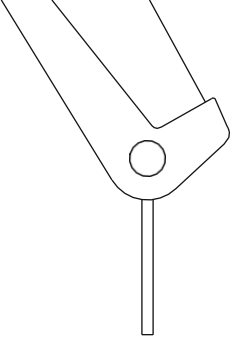


Desde las rutinas diarias...

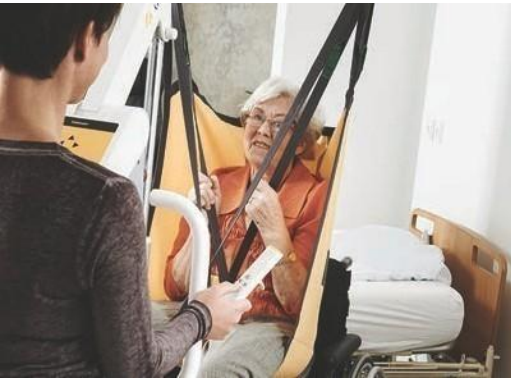

Elevación hasta y desde la cama
El GL5 eleva al paciente o usuario hasta y desde la cama. La capacidad de alta elevación y el tramo largo implican que se puede colocar correctamente al usuario en el medio de la cama o en una silla de ruedas.


«Este elevador móvil facilita las situaciones diarias de elevación y desplazamiento, tanto para los usuarios como para el personal de asistencia. Pueden ser de gran ayuda en la prevención de lesiones de espalda en los trabajadores»

Responsable, instalaciones de cuidados a largo plazo

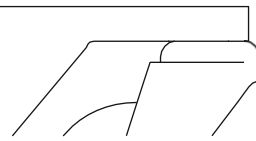



...hasta las exigencias específicas

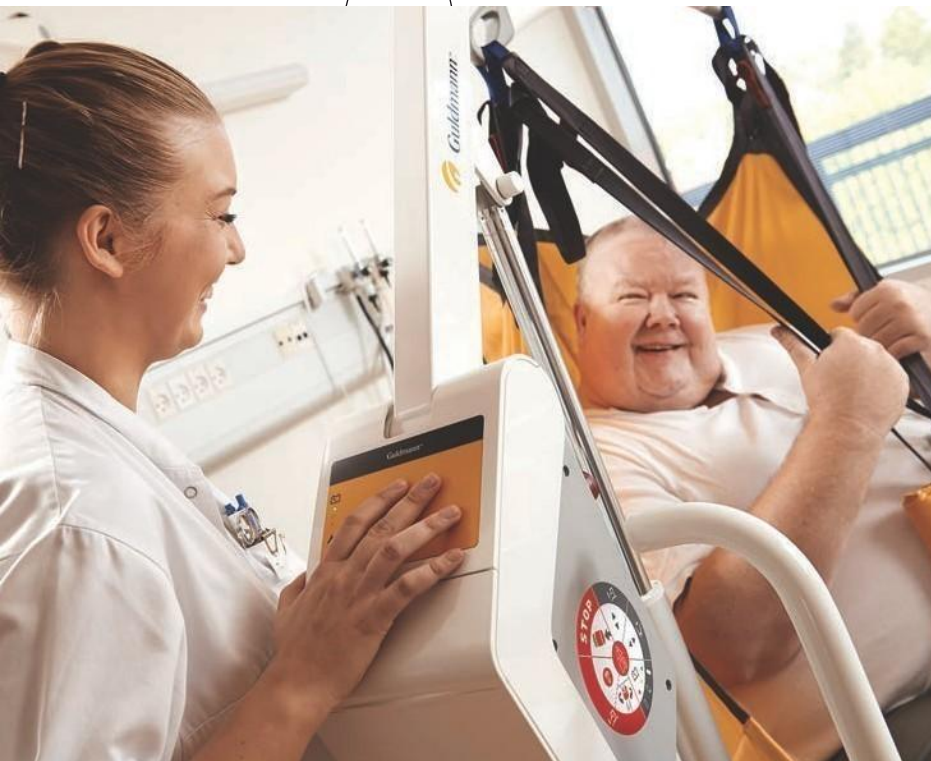


Elevación de grandes pesos

Con una capacidad de elevación de 205 kg, el GL5 es ideal para la elevación de pacientes bariátricos. Dispone de un amplio espacio para el usuario, una gran capacidad de elevación y una estabilidad excepcional que evita que el usuario se sienta incómodo o ansioso.

Elevación horizontal

De nuevo, el diseño de la altura y el alcance de elevación del GL5 lo convierten en adecuado para la elevación horizontal con los accesorios de elevación de tipo camilla de Guldmann.

El elevador móvil GL5 es un elevador completo que, en combinación con las eslingas de Guldmann, cumple la mayoría de requisitos de desplazamiento y manipulación

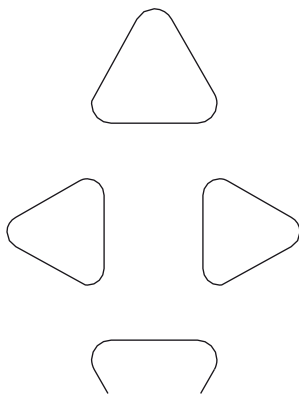





Modelo actual vendido en Chile GL5.1



Elevador Móvil

- Facilitando las transferencias, reduciendo el riesgo de lesiones de espalda para los proveedores de cuidados y mejorando la comodidad y la seguridad tanto para el cuidador como para el usuario.

Los elevadores móviles GL5.1 son las alternativas basadas en el piso a las soluciones de elevación montadas en el techo que se ofrecen en la gama de productos Guldmann.

El elevador GL5.1 está disponible en dos modelos diferentes, con una capacidad de elevación de 155 o 205 kg, respectivamente. Ambos modelos cuentan con elevación eléctrica y

ajuste de ancho para permitir un fácil acceso alrededor de sillas, baños y la capacidad de elevar desde el piso.

Levantando hacia y desde el piso:

GL5.1 puede elevarse directamente del piso a una silla o cama. Esto hace que un GL5.1 sea la solución ideal si se produce una necesidad de elevación imprevista donde no hay un elevador montado en el techo disponible.

Levantando hacia y desde la cama

GL5.1 garantiza una elevación efectiva hacia y desde la cama. La capacidad de levantar alto y el resultado de largo

alcance en el usuario puede colocarse correctamente en el medio de la cama, o colocarse correctamente en una silla de ruedas.

Levantamiento de alta carga:

Con la capacidad de levantar 205 kg, el GL5.1 es capaz de levantar pacientes bariátricos.

Elevación horizontal:

Con el diseño avanzado de la altura de elevación y el alcance, el GL5.1 es muy adecuado para la elevación horizontal con los accesorios estilo camilla Guldmann.

Modelo Elevador Móvil de Pacientes GL5.1



Características del GL5.1

- **Bajo alcance:** Capacidad de levantar directamente desde el piso
- **Alto alcance:** capacidad de elevar usuarios altos en eslingas grandes, sin dificultad
- **Flexible:** con el tipo apropiado de eslingas / accesorios, el GL5.1 puede manejar todos los requisitos de movimiento y manipulación
- **Fácil de usar:** fácil de usar para personas altas y bajas. Puede ser operado por el control manual o por el panel de operación
- **Seguro:** el GL5.1 es fuerte, estable y confiable, diseñado para uso intensivo en entornos de trabajo profesionales. Fiable: el GL5.1 presenta un indicador visual de advertencia si el elevador está sobrecargado y la capacidad de la batería se indica en 3 intervalos:
 - Bajo 0 - 25%
 - Medio 25 - 50%
 - Alto 50 - 100%
- **Señal de audio a baja tensión de batería** cuando aprox. 25%. El indicador de servicio visual se ilumina cuando se requiere mantenimiento.
- **Actuadores Linak fuertes, silenciosos y rápidos.** Diseño moderno: ofrece carga dentro o fuera de la placa, para adaptarse al entorno en el que se utiliza el GL5.1.
- **Capacidades generales:** El GL5.1 facilita el manejo de una amplia gama de situaciones de movimiento y manejo, a la vez que es ergonómicamente seguro y seguro tanto para el proveedor como para el usuario.

Guldmann™



BALANZA DIGITAL





Dispositivo de elevación

Eje conector rápido en la parte superior de la balanza digital

Eje conector rápido en la base de la balanza digital

Adaptador para el gancho de elevación

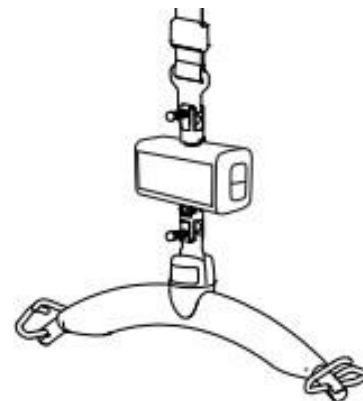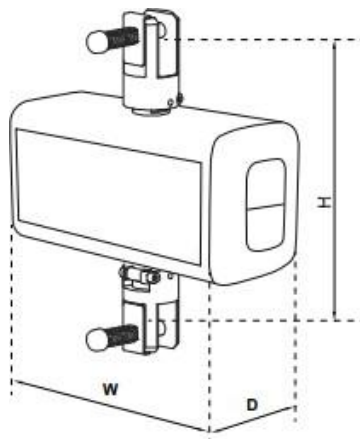

CARACTERÍSTICAS:

La báscula digital se puede utilizar con todos los elevadores de techo y elevadores móviles de Guldmann.


Simplifica los procesos de trabajo al facilitar el pesaje del paciente junto con los procedimientos de atención diaria.

Modelo de clase III con homologación médica capaz de soportar cargas de hasta 300 kg. La balanza digital funciona con pilas.

Presenta conexión rápida en serie al equipo

Permite mostrar peso NETO, BRUTO y TARA

Presenta función HOLD para mantener el peso del paciente fijo.

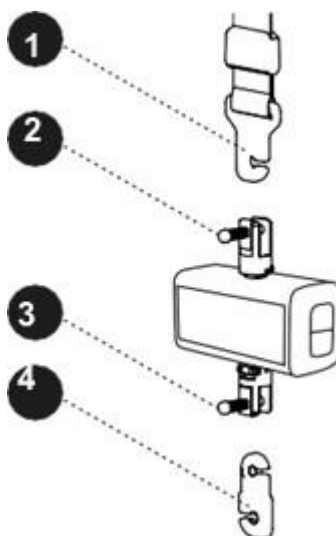

Guldmann™

Hamaca

Básico Alto



Función

La hamaca Basic High es una eslinga de elevación de cuerpo completo adecuada para una amplia variedad de usuarios y operaciones de elevación. El cabestrillo sostiene todo el cuerpo, incluida la cabeza.

Es ideal para levantar, mover y colocar a los usuarios que tienen un control reducido en la cabeza, la parte superior e inferior del cuerpo. Se puede utilizar desde una posición sentada o tumbada, por ejemplo desde el suelo, la cama o una silla de ruedas. Está diseñado para ser un cabestrillo de elevación general para lograr la mayoría de situaciones de elevación.

El arnés Basic High está disponible en varios materiales. La versión de red se puede utilizar como arnés de baño. Ambos materiales son muy duraderos y fáciles de trabajar, lo que permite que el aire circule por el cuerpo y proporciona una excelente comodidad y apoyo para el usuario.


Tarea de cuidado

- Cama a silla
- Cama a silla de ducha
- Cama a inodoro
- Recuperación del suelo
- Asiento con apoyo
- Sentado: equilibrio
- Reacciones de equilibrio
- Extracción de coche
- Terapia acuática
- Ayuda en funciones de parto

Material:

- Poliéster resistente reutilizable y lavable.
- Soporte de cabeza y columna
- Correas de seguridad, con protección de muslos, impide caídas
- Soporta hasta 205 kg

			
	Poliéster	Poliéster Red	Polipropileno Desechable
Talla	Artículo No .	Artículo No .	Artículo No .
XS	272031	272133	283631
S	272041	272143	283641
METRO	272051	272153	283651
L	272061	272163	283661
SG	272071	272173	283671
2XL	272081	272183	283681
Elevación máxima capacidad	255 kilogramos	255 kilogramos	205 kilogramos

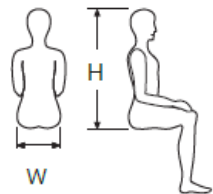

	Niños	Niños	Niños	XS	S	METRO	L	SG	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10-14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95-102	95-102	95-102 45-49
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45		48 - 52	54 - 58

Hamaca Horizontal



	
	Poliéster
Talla	Artículo No .

Estándar 205 kg 28463

Función
Hamaca para elevación de pacientes de forma horizontal.

Soporta todo el cuerpo, incluida la cabeza y pies.


Presenta 8 correas para soporte de elevación, en diferentes puntos de apoyo y alturas, con el fin de realizar una elevación nivelada del paciente.

Es necesaria la base de soporte horizontal para poder llevar a cabo esta elevación.

- Material:**
- Poliéster resistente, reutilizable y lavable
 - Soporta hasta 205 kg
 - También esta versión de hamaca, está disponible en desechable.
 - Debe ser lavada entre cada paciente

			
Lavado normal en el indicado temperatura	No utilice agente blanqueador	Secadora a baja temperatura	No planchar

Soporte Horizontal

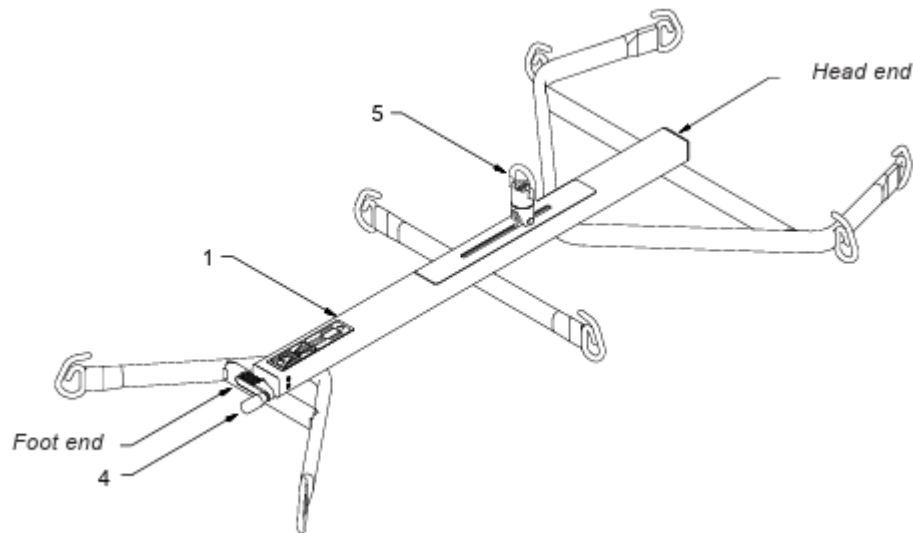

Especificaciones técnicas

Soporte de elevación horizontal con ajuste de peso continuamente variable

Capacidad de elevación máx.375 kg (825 lbs)

Peso11,6 kg (25,5 lbs)

Soporte de elevación horizontal con 10 posiciones de elevación diferentes

Capacidad de elevación máx.375 kg (825 lbs)

Peso10,9 kg (24 lbs)

Dimensiones

Soporte de elevación horizontal (An x Al x P) 716 x 110 x 1425 mm

Materiales

Soporte de elevación horizontal Hierro recubierto de polvo y plástico LDPE