



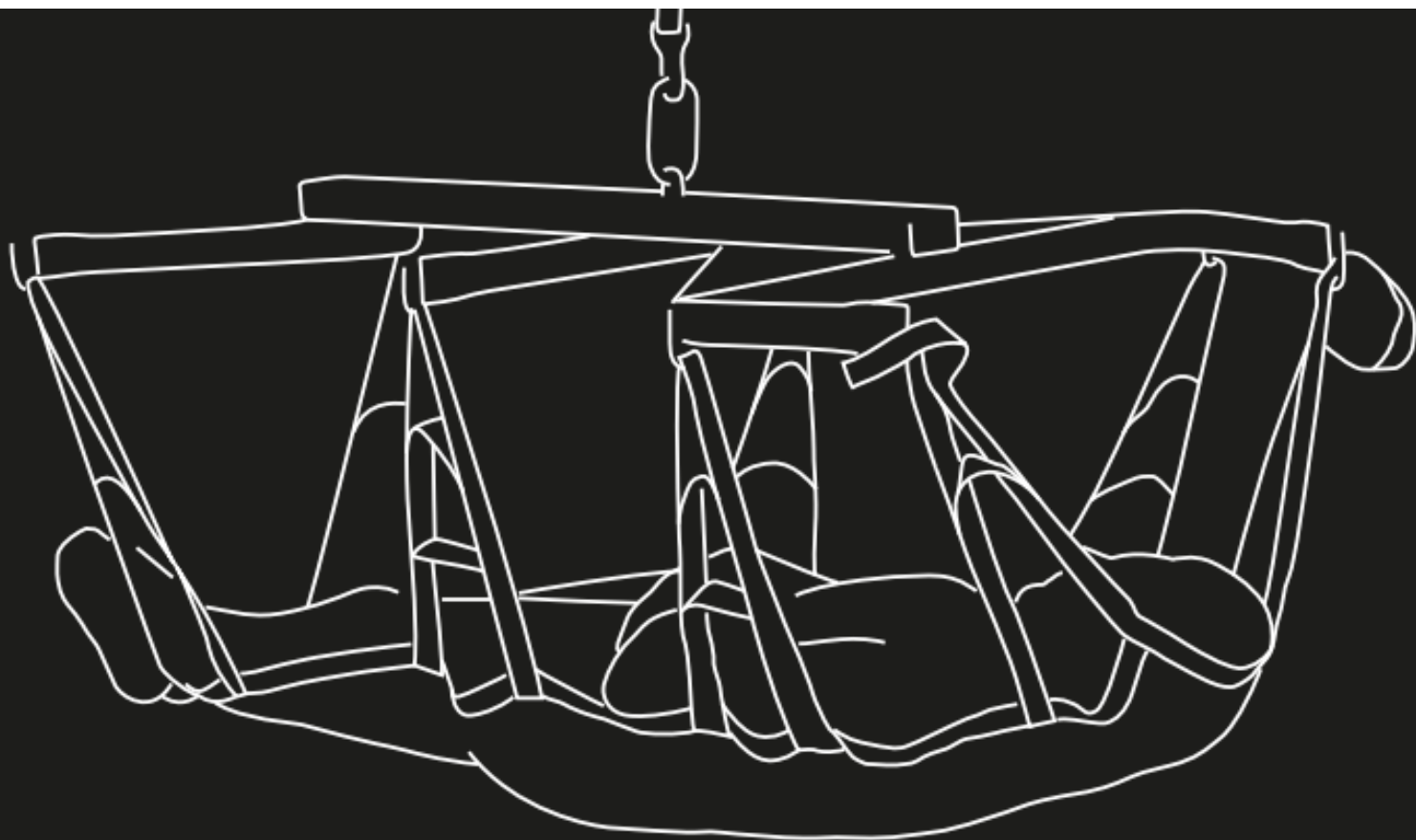

**SOPORTE PARA ELEVACIÓN
DE PACIENTES HORIZONTAL**

Guldmann™

Soporte horizontal

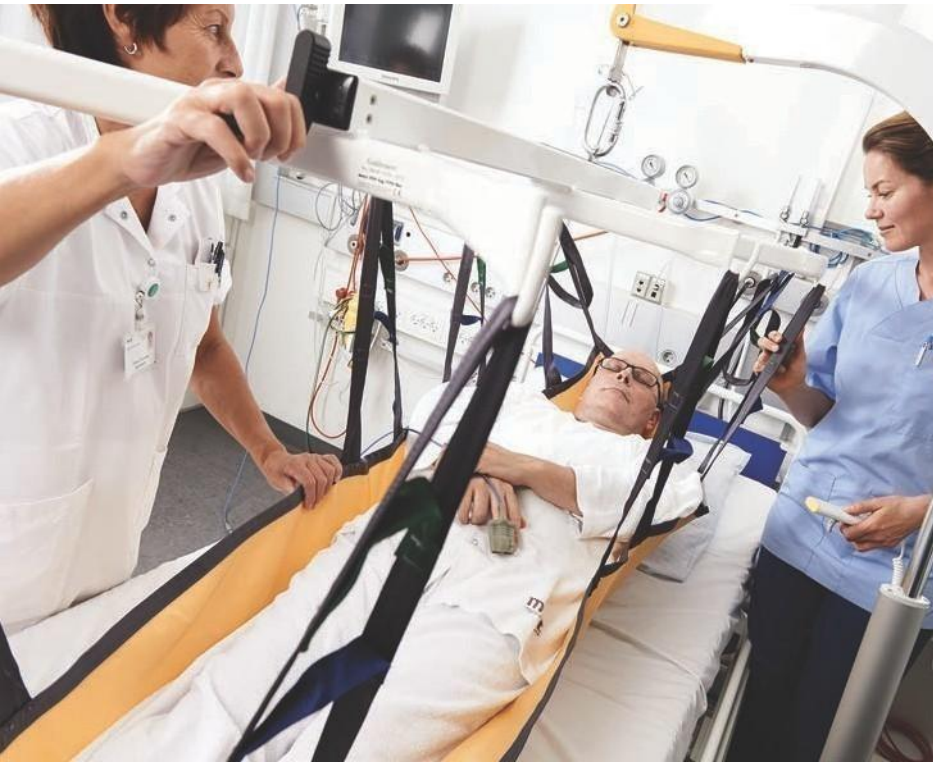

Facilita las transferencias y reduce el riesgo de lesiones de espalda en los cuidadores. Además, mejora la comodidad y la seguridad de cuidadores y usuarios

El soporte horizontal con ajuste continuo del peso se emplea, junto con un arnés de elevación horizontal y una grúa de techo o un elevador móvil, para desplazar a personas que deben mantenerse en posiciones horizontales.

El elevador horizontal se utiliza en situaciones en las que se requiere una elevación en horizontal del paciente desde una posición inicial horizontal.

La posición puede ser completamente horizontal o bien se puede modificar con ayuda del ajuste continuo del centro de gravedad para obtener la inclinación que mejor se adapte a los requisitos de elevación. El ajuste de peso variable sin fin se activa mediante una empuñadura giratoria.


La hamaca para elevación horizontal está disponible en versión desechable, como también en versión reutilizable.

2.02

Descripción funcional

1. Elevador horizontal, con regulación del peso sin fracciones.
2. Elevador horizontal con 10 diferentes posiciones de elevación.
3. Gancho oval
4. Palanca de ajuste de altura
5. Gancho giratorio GH2/GH3, piezas de recambio (no incluido)

1. Soporte de elevación horizontal con regulación del peso sin fracciones

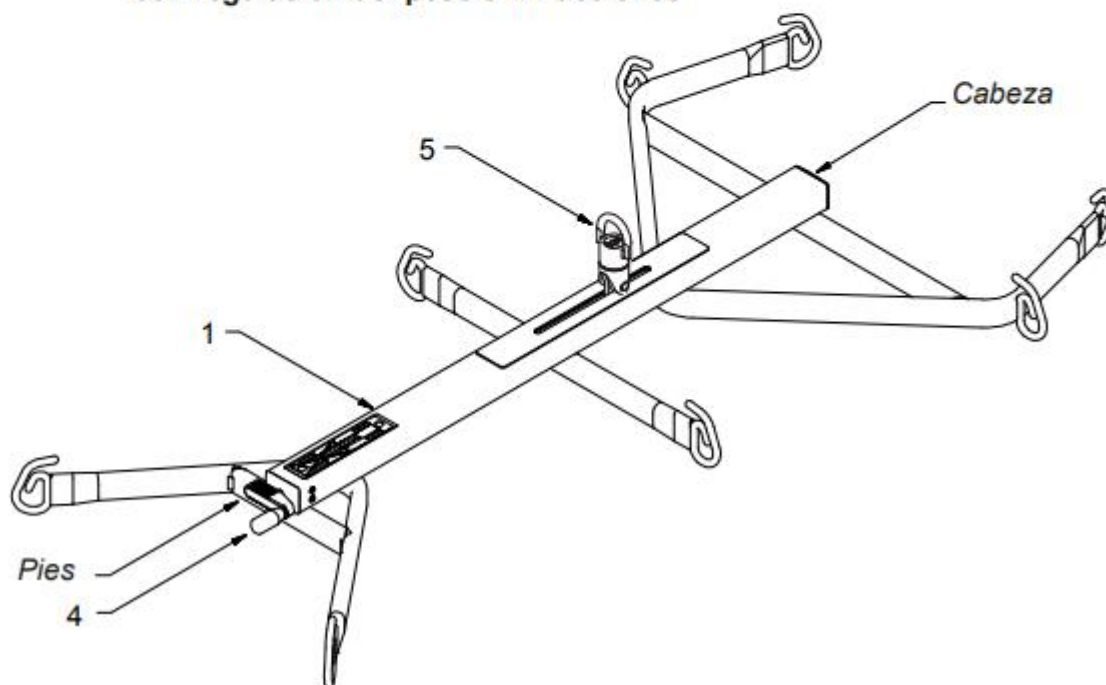

Especificaciones técnicas

Soporte de elevación horizontal con regulación del peso sin fracciones
Capacidad de elevación máx. 375 kg
Peso 11,6 kg

Soporte de elevación horizontal con 10 diferentes posiciones de elevación
Capacidad de elevación máx. 375 kg
Peso 10,9 kg

Dimensiones

Soporte de elevación horizontal (an. x al. x pr.) 716 x 110 x 1425 mm

Materiales

Soporte de elevación horizontal. Hierro recubierto de polvo y plástico PEBD

Hamaca Horizontal Reutilizable



	
	Poliéster
Talla	Artículo No .

Estándar 205 kg

Función
Hamaca para elevación de pacientes de forma horizontal.

Soporta todo el cuerpo, incluida la cabeza y pies.

Presenta 8 correas para soporte de elevación, en diferentes puntos de apoyo y alturas, con el fin de realizar una elevación nivelada del paciente.

Es necesaria la base de soporte horizontal para poder llevar a cabo esta elevación.

Material:
-Poliéster resistente, reutilizable y lavable
-Soporta hasta 205 kg

-También esta versión de hamaca, está disponible en desechable.

-Debe ser lavada entre cada paciente

			
Lavado normal en el indicado temperatura	No utilice agente blanqueador	Secadora a baja temperatura	No planchar

Hamaca Horizontal Desechable



Poliéster

N° de producto	Tamaño	Material
284631	10 unidades	Poliéster

La hamaca horizontal desechable Guldmann se utiliza junto al soporte de elevación horizontal Guldmann, tiene una capacidad de carga de hasta 350 kg.

El arnés sostiene todo el cuerpo, incluida la cabeza, y eleva al usuario en posición supina para trasladarlo de la cama a la camilla o al suelo.

Se utiliza con frecuencia para cambiar la ropa de cama o para recolocar al usuario en la cama.

El arnés es de uso exclusivo para un solo paciente y NO debe lavarse.

Es ideal para situaciones que requieren un alto nivel de higiene y donde existe un riesgo elevado de contagio e infección.

Deseche el arnés después del alta del paciente o inmediatamente después de su uso si se ha mojado o ensuciado.

El cabestrillo lleva una etiqueta indicadora de no lavar. La eslinga horizontal desechable está fabricada en material de poliéster.

Capacidad de elevación de hasta 350 kg.

Se suministra en una caja de diez unidades.

La hamaca se puede utilizar con todos elevadores de techo y elevadores móviles de Guldmann.

El uso del arnés adecuado es esencial para realizar transferencias eficaces y garantizar la comodidad, la dignidad y la seguridad tanto del usuario como del cuidador.